

Orteza palca ręki- staw międzypaliczkowy dalszy

(DIP) płastyczna – CH_12

WSKAZANIE

W niektórych przypadkach urazów lub stanów zwyrodnieniowych/artretyzmu, złamań opuszków palców, urazów ścięgien prostowników opuszków palców, zapalenia stawów lub bólu stawu końcowego palca, orteza Chrisofix® o innowacyjnej konstrukcji zapewnia odpowiednie ułożenie i stabilność, zapewniając jednocześnie komfort, swobodę ruchu sąsiednich stawów i precyzyjne dopasowanie.



12345



ELASTYCZNY



ŚWIATŁO



PERFOROWANY



PRZEZROCZYSTY



ZMYWALNY

Aplikacja i regulacja

Gotowe do regulacji szyny/ortezy Chrisofix® należy dopasować bezpośrednio do uszkodzonej/chorej części ciała. Wstępną regulację (zginanie) należy wykonać na zdrowym palcu. Dokładne regulacje i ponowne regulacje (np. po zmniejszeniu obrzęku tkanek miękkich) można wykonać bez zdejmowania szyny/ortezy.

Opuszek palca, który ma zostać unieruchomiony, należy umieścić w ortezie/szynie. Ortezę należy starannie dopasować do opuszki palca, delikatnie ją dociskając. Ortezę/szynę można zamocować za pomocą dołączonych rzepów. Częste zginanie i rozciąganie ortezy/szyny może osłabić jej stabilność; należy ograniczyć te czynności do niezbędnego minimum.

Tworzywo

Pianka polietylenowa (PE), welur poliamidowy (PA), bawełna, aluminium faliste i perforowane (EN AW-1050A)

Szczegóły produktu

S (Mały)

Pomiar

Długość szyny
3 cm

Numer REF / zamówienia

124 121 101

M (Średni)

Pomiar

Długość szyny
4 cm

Numer REF / zamówienia

126 121 101

L (duży)

Pomiar

Długość szyny
5 cm

Numer REF / zamówienia 128 121 101

