
WSKAZANIE

Pierwsza pomoc / Stabilizacja stawu śródręczno-paliczkowego (podstawnego) kciuka w przypadku urazów (np. naciągnięcia lub skręcenia), po operacji, stanów zapalnych (np. zapalenia pochewki ścięgna) oraz chorób zwyrodnieniowych. W przypadku choroby zwyrodnieniowej stawu siodłowego należy stosować odpowiednie urządzenie: ortezy Chrisofix® na chorobę zwyrodnieniową stawu siodłowego.





ELASTYCZNY



ŚWIATŁO



PERFOROWANY



PRZEZROCZYSTY



ZMYWALNY




Aplikacja i regulacja

Gotowe do regulacji ortezy Chrisofix® należy dopasować bezpośrednio do kontuzjowanej/chorej części ciała.

Zgrubną regulację (zginanie) należy wykonać na nieuszkodzonej kończynie o podobnej wielkości. Dokładne regulacje i korekty (np. po zmniejszeniu obrzęku tkanek miękkich) można wykonać bez zdejmowania ortezy.

- Umieść kciuk w odpowiednio uformowanej ortezie.
- Delikatnie dopasuj ortezę do kciuka, a następnie zapnij zapięcia wokół kciuka i na nadgarstku.
- Możesz regulować odległość między kciukiem a palcem wskazującym, wybierając kąt zapięcia wokół kciuka.

Aby zdjąć ortezę, nie trzeba odpinać paska na kciuku; kciuk można po prostu wyciągnąć, a następnie ponownie wsunąć do mocowania. Częste zginanie i rozciąganie ortezy może zaburzyć jej stabilność; należy je ograniczyć do niezbędnego minimum.

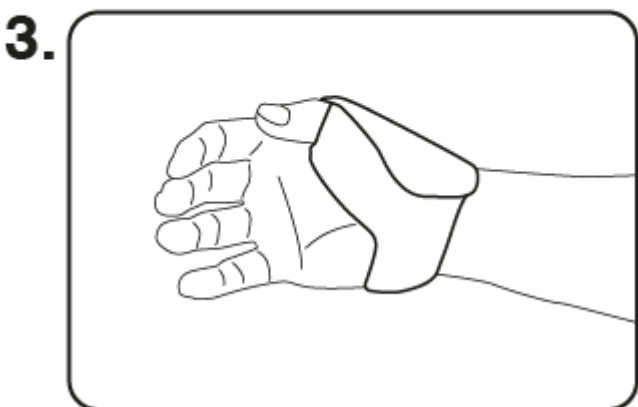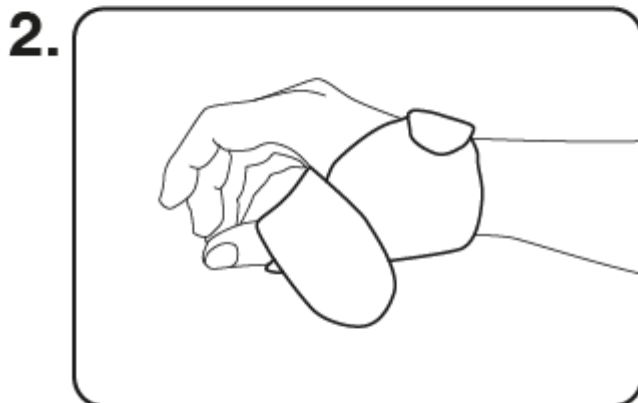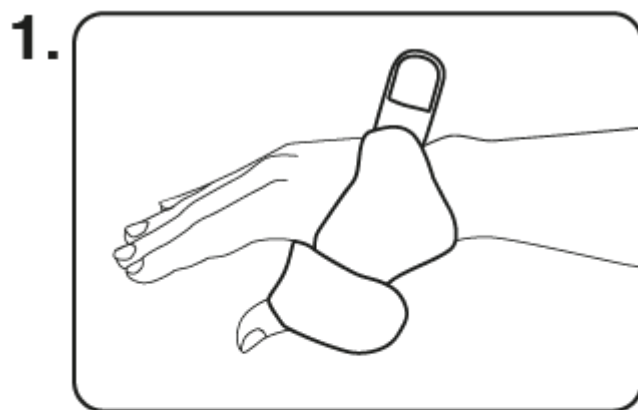

Tworzywo

Pianka polietylenowa (PE), welur poliamidowy (PA), bawełna, aluminium faliste i perforowane (EN AW-1050A)

Szczegóły produktu

XXS (dziecięcy duży)

Pomiar

Staw IP - linia nadgarstka
< 7 cm

Numer REF / zamówienia

162 121 187

S (mały)

Pomiar

Staw IP - linia nadgarstka
7 - 8 cm

Numer REF / zamówienia

164 121 187

M (średni)

Pomiar

Staw IP - linia nadgarstka
8-9 cm

Numer REF / zamówienia

166 121 187

L (duży)

Pomiar

Staw IP - linia nadgarstka
9 < cm

Numer REF / zamówienia

168 121 187

