

Orteza kciuka

CH_23-24 (Prawa) (Lewa)

WSKAZANIE

Orteza na kciuk (kciuk narciarza) to odpowiedni produkt na typowe urazy sportowe, takie jak tenis, golf czy inne dyscypliny, gdzie kciuk może ulec uszkodzeniu, zwichnięciu lub skręceniu. Dzięki specjalnej, falistej konstrukcji aluminiowej zapewnia rzeczywiste i skuteczne unieruchomienie kciuka, a także wspomaga odciążenie stawu.

Unieruchomienie stawu śródrečno-paliczkowego I (I.MCP) w przypadku urazów, skręceń, kciuka leskiera. Częściowe unieruchomienie stawu siodłowego kciuka, zalecane do stosowania w ciągu dnia.

Ponadto jest on stosowany w przypadku różnych urazów stawu śródrečno-paliczkowego kciuka, skręceń, rehabilitacji po złamaniach lub jako uzupełnienie odpowiednich zabiegów chirurgicznych w obrębie stawu śródrečno-paliczkowego kciuka, według uznania lekarza.





ELASTYCZNY



ŚWIATŁO



PERFOROWANY



PRZEZROCZYSTY



ZMYWALNY




Aplikacja i regulacja

Gotowe do regulacji ortezy Chrisofix® należy dopasować bezpośrednio do kontuzjowanej/chorej części ciała.

Zgrubną regulację (zginanie) należy wykonać na nieuszkodzonej kończynie o podobnej wielkości. Dokładne regulacje i korekty (np. po zmniejszeniu obrzęku tkanek miękkich) można wykonać bez zdejmowania ortezy.

- Umieść kciuk w odpowiednio uformowanej ortezie.
- Delikatnie dopasuj orteżę do kciuka, a następnie zapnij zapięcia wokół kciuka i na nadgarstku.
- Możesz regulować odległość między kciukiem a palcem wskazującym, wybierając kąt zapięcia wokół kciuka.

Aby zdjąć orteżę, nie trzeba odpinać paska na kciuku; kciuk można po prostu wyciągnąć, a następnie ponownie wsunąć do mocowania. Częste zginanie i rozciąganie ortezy może zaburzyć jej stabilność; należy je ograniczyć do niezbędnego minimum.

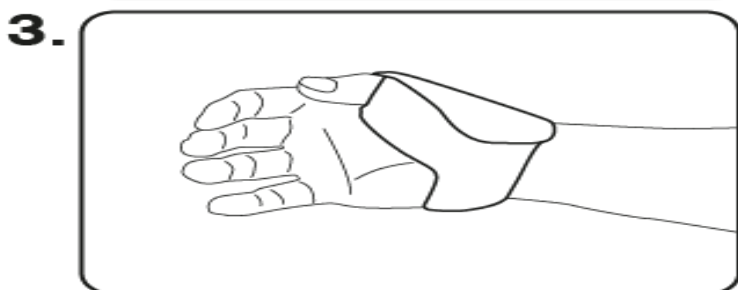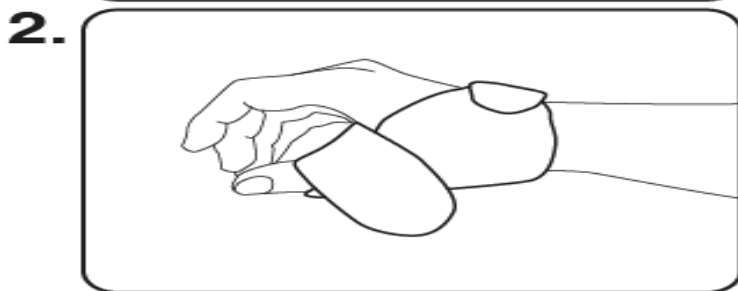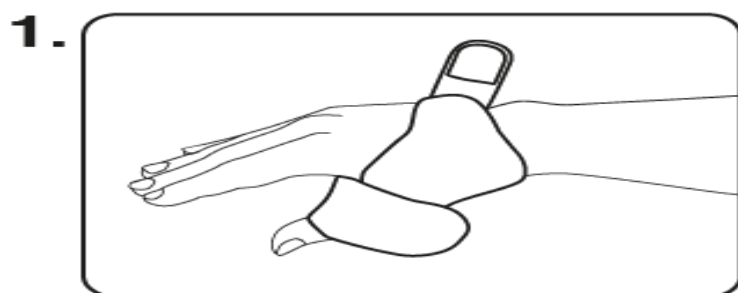

Tworzywo

Pianka polietylenowa (PE), welur poliamidowy (PA), bawełna, aluminium faliste i perforowane (EN AW-1050A)

Szczegóły produktu

S (mały)

Pomiar

Szerokość dłoni
< 8 cm

Numer REF / zamówienia

Po prawej: 234 121 186
Lewy: 244 121 186

M (średni)

Pomiar

Szerokość dłoni
8-9 cm

Numer REF / zamówienia

Po prawej: 236 121 186
Lewy: 246 121 186

L (duży)

Pomiar

Szerokość dłoni
9 < cm

Numer REF / zamówienia

Po prawej: 238 121 186
Lewy: 248 121 186