

**WSKAZANIE**

Unieruchomienie V kości śródreżcza, w tym stawu śródreżczno-paliczkowego (MP) i nadgarstkowo-śródreżcznego (CMP), po urazach, skręceniach i złamaniach V kości śródreżcza, po zabiegu operacyjnym i wstępnym unieruchomieniu gipsem. Rehabilitacja pooperacyjna lub leczenie po złamaniu.






**ELASTYCZNY**



**ŚWIATŁO**

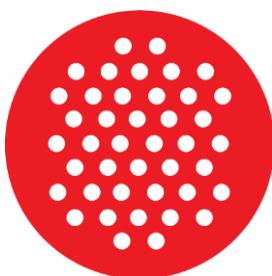

**PERFOROWANY**



**PRZEZROCZYSTY**






**ZMYWALNY**

## **Aplikacja i regulacja**

Gotowe do regulacji ortezy Chrisofix należy dopasować bezpośrednio do kontuzjowanej/chorej części ciała. Zgrubną regulację (zginanie) należy wykonać na nieuszkodzonej kończynie o podobnej wielkości. Dokładne regulacje i korekty (np. po zmniejszeniu obrzęku tkanek miękkich) można wykonać bez zdejmowania ortezy.

- Wygnij gotową ortezę tak, aby uzyskać żądaną pozycję (kąąt) palców IV+V.
- Włóż uszkodzoną dłoń i palce IV-V stroną łokciową do gotowej ortezy.
- Delikatnie naciskając, dokładnie dopasuj ortezę do dłoni i palców.
- Zamocuj palce IV-V za pomocą pętli.
- Jeśli zajdzie taka potrzeba, można skorygować wygięcie ortezy do ostatecznie pożądanej pozycji.
- Zamocuj ortezę na dłoni za pomocą bandażu pomiędzy kciukiem i palcem wskazującym oraz wokół nadgarstka i przedramienia.

Aby zdjąć ortezę, nie trzeba odpinać paska na palcach, wystarczy je po prostu wyciągnąć i później z powrotem włożyć do mocowania.

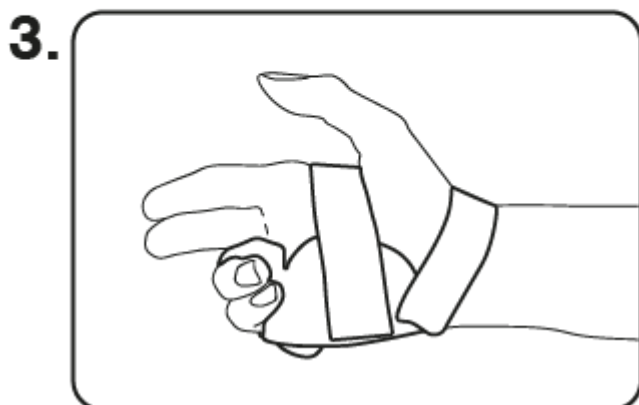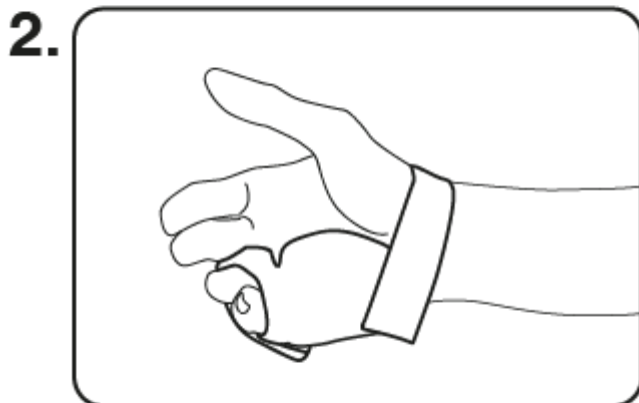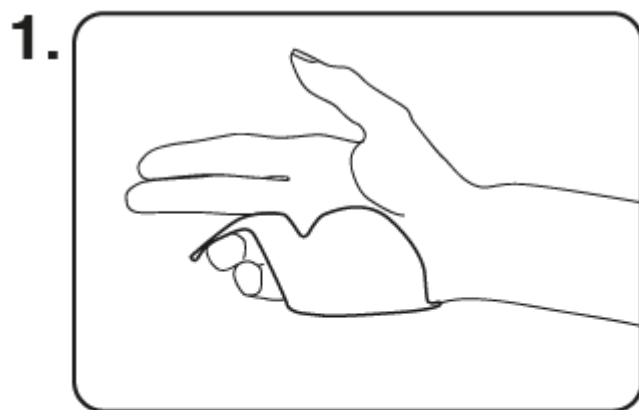

Tworzywo

Pianka polietylenowa (PE), welur poliamidowy (PA), bawełna, aluminium faliste i perforowane (EN AW-1050A)

## Szczegóły produktu

### S (mały)

---

**Pomiar**

Staw PIP palca V. – linia nadgarstka  
< 10,5 cm

---

**Numer REF / zamówienia**

284 121 186

### M (średni)

---

**Pomiar**

Staw PIP palca V. – linia nadgarstka  
10,6-11,9 cm

---

**Numer REF / zamówienia**

286 121 186

### L (duży)

---

**Pomiar**

Staw PIP palca V. – linia nadgarstka  
12 cm <

---

**Numer REF / zamówienia**

288 121 186