

Uniwersalna orteza nadgarstka – CH_31-32 (PRAWA-LEWA)

WSKAZANIE

Stabilizacja i/lub unieruchomienie nadgarstka w przebiegu urazów (np. skręceń), jak również po nich, operacja i stabilizacja gipsem. Leczenie zachowawcze w stanach zapalnych i chorobach zwyrodnieniowych nadgarstka (bez ingerencji w kciuk).





ELASTYCZNY



ŚWIATŁO



PERFOROWANY



PRZEZROCZYSTY




ZMYWALNY

Aplikacja i regulacja

Gotowe do regulacji ortezy Chrisofix® należy dopasować bezpośrednio do kontuzjowanej/chorej części ciała. Zgrubną regulację (zginanie) należy wykonać na nieuszkodzonej kończynie o podobnej wielkości. Dokładne regulacje, czyli korekty (np. po zmniejszeniu obrzęku tkanek miękkich), można wykonać bez zdejmowania ortezy.

- Umieść przedramię stroną promieniową w gotowej do użycia ortezie.
- Ortezę należy dopasować do dłoni i nadgarstka utrzymywanych w pozycji fizjologicznej.
- Zamocuj ortezę za pomocą bandażu.

Aby zdjąć ortezę, nie trzeba odpinać paska z tyłu dłoni; dłoń można po prostu wyciągnąć, a następnie ponownie wsunąć w uchwyt. Częste zginanie i rozciąganie ortezy może zaburzyć jej stabilność; należy je ograniczyć do niezbędnego minimum.

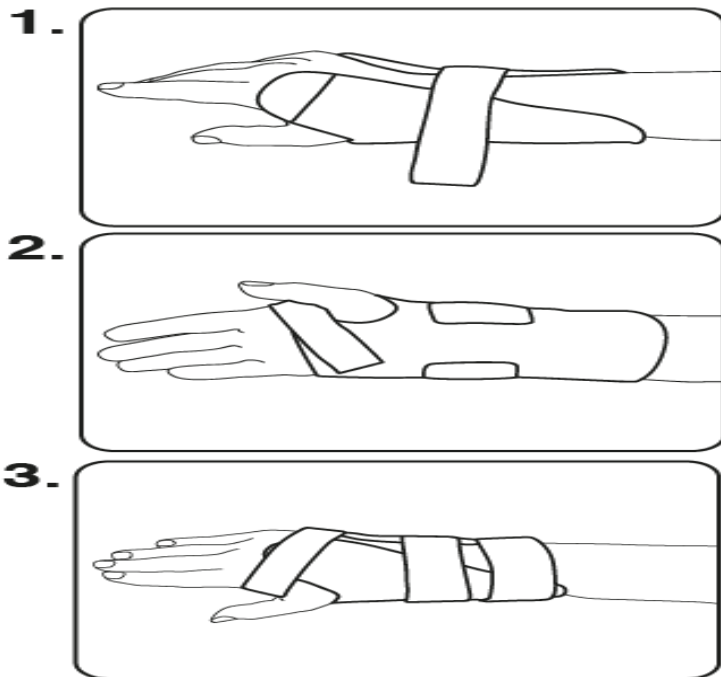

Szczegóły produktu

S (mały)

Pomiar

Szerokość dłoni

< 8 cm

Numer REF / zamówienia

Po prawej: 314 111 105

Lewy: 324 111 105

M (średni)

Pomiar

Szerokość dłoni

8-9 cm

Numer REF / zamówienia

Po prawej: 316 111 105

Lewy: 326 111 105

L (duży)

Pomiar

Szerokość dłoni

9 < cm

Numer REF / zamówienia

Po prawej: 318 111 105

Lewy: 328 111 105

Tworzywo

Pianka polietylenowa (PE), welur poliamidowy (PA), bawełna, aluminium faliste i perforowane (EN AW-1050A)