

Orteza na dłoń i przedramię - złamanie kości łódeczkowatej – CH\_35-36 (Prawa-Lewa)

---

## WSKAZANIE

Ortezę kości łódeczkowatej Chrisofix® można stosować jako uzupełnienie leczenia operacyjnego złamań kości łódeczkowatej lub po rekonstrukcyjnej operacji rzekomego zapalenia stawów kości łódeczkowatej.





**ELASTYCZNY**



**ŚWIATŁO**



**PERFOROWANY**



**PRZEZROCZYSTY**




**ZMYWALNY**

## Aplikacja i regulacja

Gotowe do regulacji ortezy Chrisofix® należy dopasować bezpośrednio do kontuzjowanej/chorej części ciała. Zgrubną regulację (zginanie) należy wykonać na nieuszkodzonej kończynie o podobnej wielkości. Dokładne regulacje i korekty (np. po zmniejszeniu obrzęku tkanek miękkich) można wykonać bez zdejmowania ortezy.

- Umieść przedramię w ortezie.
- Delikatnie dopasuj ortezę i zamocuj kciuk za pomocą rzepu.
- Zapnij trzy paski na grzbiecie dłoni, na nadgarstku i na przedramieniu. Aby zdjąć ortezę, rozepnij usztywnione paski tylko z jednej strony.

Aby zdjąć ortezę, nie trzeba odpinać paska na kciuku i grzbiecie dłoni; dłoń można po prostu wyciągnąć, a następnie ponownie wsunąć w uchwyt. Częste zginanie i rozciąganie ortezy może osłabić jej stabilność; należy je ograniczyć do niezbędnego minimum.

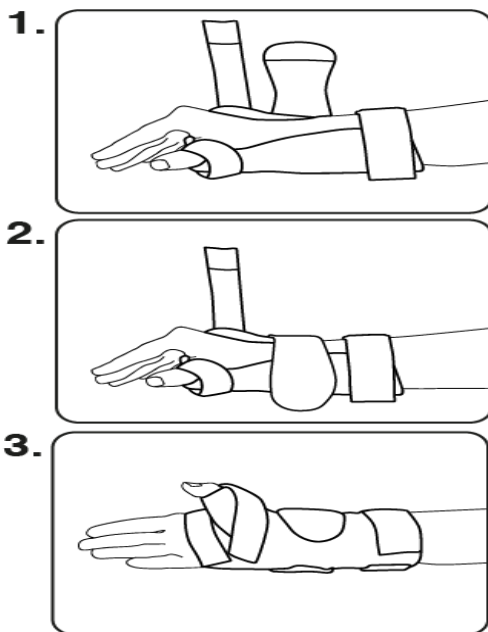

Szczegóły produktu

## **PREMIUM FORTE (Z WKŁADKĄ)**

### **S (mały)**

#### **Pomiar**

Szerokość dłoni

< 8 cm

#### **Numer REF / zamówienia**

Po prawej: 354 111 182

Lewy: 364 111 182

### **M (średni)**

#### **Pomiar**

Szerokość dłoni

8-9 cm

#### **Numer REF / zamówienia**

Po prawej: 356 111 182

Lewy: 366 111 182

### **L (duży)**

#### **Pomiar**

Szerokość dłoni

9 < cm

#### **Numer REF / zamówienia**

Po prawej: 358 111 182

Lewy: 368 111 182

Tworzywo:

Pianka polietylenowa (PE), welur poliamidowy (PA), bawełna, aluminium faliste i perforowane (EN AW-1050A)

