

Orteza na staw siodełkowy –

Stosowanie w nocy – CH\_37-38

---

## WSKAZANIE

### Do stosowania w nocy i podczas odpoczynku

Orteza stawu siodełkowego przeznaczona do użytku nocnego służy do stabilizacji stawu podstawy kciuka (MCP) i stawu siodełkowego (CMC). Może być również skutecznie stosowana w przypadku zapalenia stawów siodełkowych do unieruchomienia na noc, a także do stabilizacji kości śródręcza kciuka lub stawu siodełkowego po urazach, skręceniach, a nawet w fazie rehabilitacji po złamaniach.

Ten produkt jest również zalecany w leczeniu **zespołu De Quervaina**. Może być również stosowany jako uzupełnienie leczenia operacyjnego złamań kości śródręcza kciuka (złamania Benetta, Rolanda, Wintersteina). Można go również nosić w ciągu dnia.





**ELASTYCZNY**



**ŚWIATŁO**



**PERFOROWANY**



**PRZEZROCZYSTY**






**ZMYWALNY**

## **Aplikacja i regulacja**

Gotowe do regulacji ortezy Chrisofix® należy dopasować bezpośrednio do kontuzjowanej/chorej części ciała. Zgrubną regulację (zginanie) należy wykonać na nieuszkodzonej kończynie o podobnej wielkości. Dokładne regulacje i korekty (np. po zmniejszeniu obrzęku tkanek miękkich) można wykonać bez zdejmowania ortezy.

- Umieść przedramię w gotowej do użycia ortezie.
- Delikatnie dopasuj ortezę do dłoni i nadgarstka, a następnie zamknij pierścień wokół kciuka.
- Zamocuj bandaż na grzbiecie dłoni, wokół nadgarstka i przedramienia.

Aby zdjąć ortezę, nie trzeba odpinać paska na kciuku i grzbiecie dłoni; dłoń można po prostu wyciągnąć, a następnie ponownie wsunąć w uchwyt. Częste zginanie i rozciąganie ortezy może osłabić jej stabilność; należy je ograniczyć do niezbędnego minimum.

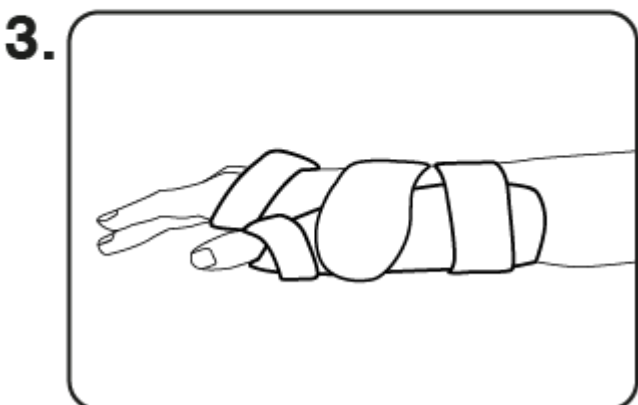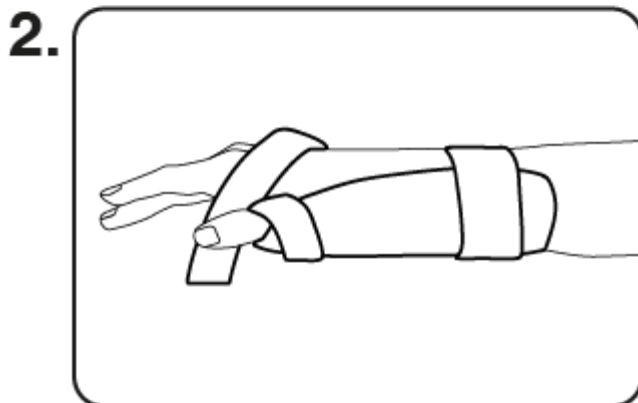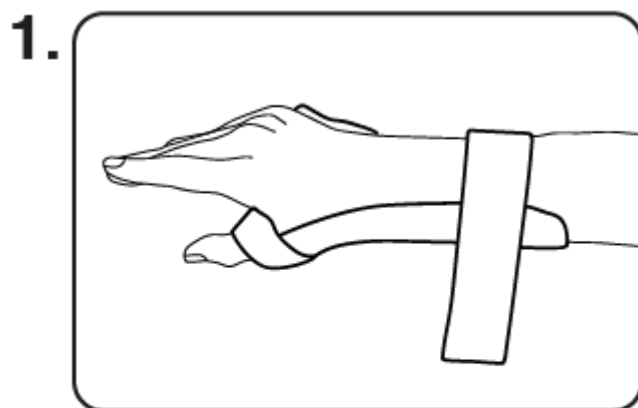

Tworzywo

Pianka polietylenowa (PE), welur poliamidowy (PA), bawełna, aluminium faliste i perforowane (EN AW-1050A)

## Szczegóły produktu

### PREMIUM FORTE (Z WKŁADKĄ)

#### XXXS (dziecięcy mały)

---

**Pomiar**

Szerokość dłoni  
< 5 cm

---

**Numer REF / zamówienia**

Po prawej: 371 121 172  
Lewy: 381 121 172

#### XXS (dziecięcy duży)

---

**Pomiar**

Szerokość dłoni  
5-6 cm

---

**Numer REF / zamówienia**

Po prawej: 372 121 172  
Lewy: 382 121 172

#### XS (bardzo mały)

---

**Pomiar**

Szerokość dłoni  
6-7 cm

---

**Numer REF / zamówienia**

Po prawej: 373 121 172  
Lewy: 383 121 172

## S (mały)

---

### Pomiar

Szerokość dłoni  
7-8 cm

---

### Numer REF / zamówienia

Po prawej: 374 121 172  
Lewy: 384 121 172

## M (średni)

---

### Pomiar

Szerokość dłoni  
8-9 cm

---

### Numer REF / zamówienia

Po prawej: 376 121 172  
Lewy: 386 121 172

## L (duży)

---

### Pomiar

Szerokość dłoni  
9< cm

---

### Numer REF / zamówienia

Po prawej: 378 121 172  
Lewy: 388 121 172