
WSKAZANIE

Stabilizacja nadgarstka w przypadku zniekształceń, stabilnych złamań, po operacji lub po pierwotnym unieruchomieniu gipsem. Leczenie zachowawcze zapalenia ścięgien/pochwy ścięgna (bez udziału kciuka), a także stanów zwyrodnieniowych lub zapalnych nadgarstka.

Terapia adjuwantowa odruchowej dystrofii współczulnej (SUDECK). Przerwana fiksacja w trakcie rehabilitacji pooperacyjnej.





ELASTYCZNY



ŚWIATŁO



PERFOROWANY



PRZEZROCZYSTY




ZMYWALNY

Aplikacja i regulacja

Gotowe do regulacji ortezy Chrisofix® należy dopasować bezpośrednio do kontuzjowanej/chorej części ciała. Zgrubną regulację (zginanie) należy wykonać na nieuszkodzonej kończynie o podobnej wielkości. Dokładne regulacje i korekty (np. po zmniejszeniu obrzęku tkanek miękkich) można wykonać bez zdejmowania ortezy.

- Włóż przedramię stroną łokciową do gotowej do użycia ortezy.
- Dopasuj ortezę do nadgarstka i przedramienia, delikatnie naciskając.
- Ułóż nadgarstek w żądanej pozycji.
- Zapnij bandażę pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym na nadgarstku i przedramieniu.

Aby zdjąć ortezę, nie trzeba odpinać paska z tyłu dłoni; dłoń można po prostu wyciągnąć, a następnie ponownie wsunąć w uchwyt. Częste zginanie i rozciąganie ortezy może zaburzyć jej stabilność; należy je ograniczyć do niezbędnego minimum.

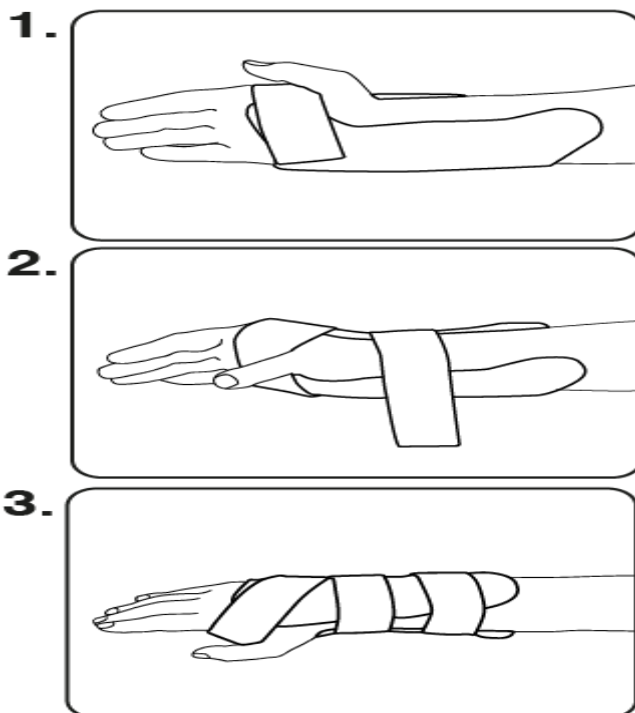

Szczegóły produktu

PREMIA

XXS (dziecięcy duży)

Pomiar

Szerokość dłoni < 7 cm

Numer REF / zamówienia

392 111 107

S (mały)**Pomiar**

Szerokość dłoni

7-8 cm

Numer REF / zamówienia

394 111 107

M (średni)**Pomiar**

Szerokość dłoni

8-9 cm

Numer REF / zamówienia

396 111 107

L (duży)**Pomiar**

Szerokość dłoni

9 < cm

Numer REF / zamówienia

398 111 107

Tworzywo

Pianka polietylenowa (PE), welur poliamidowy (PA), bawełna, aluminium faliste i perforowane (EN AW-1050A)