

## WSKAZANIE

Zalecane do stosowania w przypadku stłuczenia klatki piersiowej, złamania żeber lub unoszenia się klatki piersiowej (aby zapobiec oddychaniu paradoksalnemu) oraz po operacjach klatki piersiowej.



### Aplikacja i regulacja

Złamanie(a) muszą zostać zlokalizowane za pomocą zdjęcia rentgenowskiego przed założeniem szyny.

Pacjent powinien siedzieć lub stać (najlepiej nie leżeć) w momencie zakładania szyny. Pacjent powinien przyjąć postawę wyprostowaną tak bardzo, jak to możliwe. Prawidłowa postawa ułatwia prawidłowe założenie szyny.

Skóra powinna być pozbawiona włosów i odtłuszczona przed założeniem szyny.

Wstępne uformowanie szyny powinno zostać wykonane po nieuszkodzonej stronie klatki piersiowej.

Dopasuj powierzchnię szyny oznaczoną strzałką do klatki piersiowej tak, aby kierunek strzałki był zgodny z żebrami.

Zdejmij papierową osłonę oznaczoną strzałką z powierzchni szyny.

Przyłóż szynę do okolicy złamania podczas wydechu. Szyna musi obejmować złamanie. Podczas wdechu zdejmij papierową osłonę z dolnej części wodoodpornej folii i dociśnij brzegi folii samoprzylepnej do skóry.

Używając klapki na zewnętrznej powierzchni szyny, usuń zewnętrzną przezroczystą folię. Dzięki temu wodoodporna folia będzie oddychająca.

Nie pozostawiaj tej ostatniej osłony na szynie. Usuń ją dopiero na samym końcu, w przeciwnym razie szyna nie będzie nadawała się do użytku!

Szczegóły produktu – Shell

### **S (mały)**

od 1 do 3 złamanych żeber

---

#### **Pomiar**

Wymiary szyny

12 x 17 cm

---

#### **Numer REF / zamówienia**

604 226 104

### **L (duży)**

dla więcej niż 3 złamanych żeber

---

#### **Pomiar**

Wymiary szyny

17 x 17 cm

---

#### **Numer REF / zamówienia**

608 226 104

Do rozważenia

przy

użyciu szyn

Orteza klatki piersiowej Chrisofix® jest lekka, wygodna i przepuszczalna dla promieni rentgenowskich. Materiały, z których jest wykonana, są przyjazne dla skóry i nie

powodują alergii. Ortezę należy założyć dopiero po dokładnym zlokalizowaniu złamanych żeber (kontrola medyczna/radiologiczna!). Wstępne zakładanie/dopasowanie należy wykonać po stronie zdrowej. Ortezę należy jedynie zginać i nie przecinać. Orteza klatki piersiowej jest przeznaczona do jednorazowego użytku, trwającego około dziesięciu dni.

W przypadku dłuższego leczenia może być konieczne założenie nowej szyny. W przypadku swędzenia należy zdjąć folię ochronną i wzmocnić mocowanie ortozy do klatki piersiowej antyalergicznymi, nieakryłowymi plastrami. Podczas kąpieli zdjętą folię ochronną należy zastąpić tymczasową ochroną przed wodą.