

Orteza na dłoń i przedramię – podparcie całej dłoni i przedramienia CH_71

WSKAZANIE

Stabilizacja lub unieruchomienie nadgarstka, dłoni i palców długich po urazach (np. skręceniu), zabieg operacyjny i stabilizacja gipsem. Leczenie zachowawcze w zapaleniu ścięgien, stanach zapalnych i chorobach zwyrodnieniowych nadgarstka, dłoni i palców długich, nawet w formie szyny spoczynkowej. Faza rehabilitacji po operacji ręki.





ELASTYCZNY




ŚWIATŁO



PERFOROWANY



PRZEZROCZYSTY

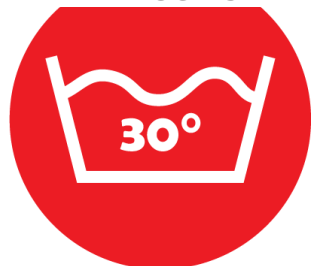


ZMYWALNY

Aplikacja i regulacja

Gotowe do regulacji ortezy Chrisofix® należy dopasować bezpośrednio do uszkodzonej/chorej części ciała. Zgrubną regulację (zginanie) należy wykonać na nieuszkodzonej kończynie o podobnej wielkości. Dokładne regulacje i korekty (np. po zmniejszeniu obrzęku tkanek miękkich) można wykonać bez zdejmowania ortezy.

- Załóż ortezę na nieuszkodzoną dłoń, nadgarstek i przedramię.
- Ustaw nadgarstek w wymaganej pozycji.
- Włóż ramię stroną dłoniową do wcześniej uformowanej ortezy.
- Dopasuj ortezę poprzez delikatny nacisk na dłoń i przedramię.
- Załóż bandaż na palce, dłoń i przedramię.

Aby zdjąć ortezę, nie trzeba odpinać paska z tyłu dłoni; dłoń można po prostu wyciągnąć, a następnie ponownie wsunąć w uchwyt. Częste zginanie i rozciąganie ortezy może zaburzyć jej stabilność; należy je ograniczyć do niezbędnego minimum.

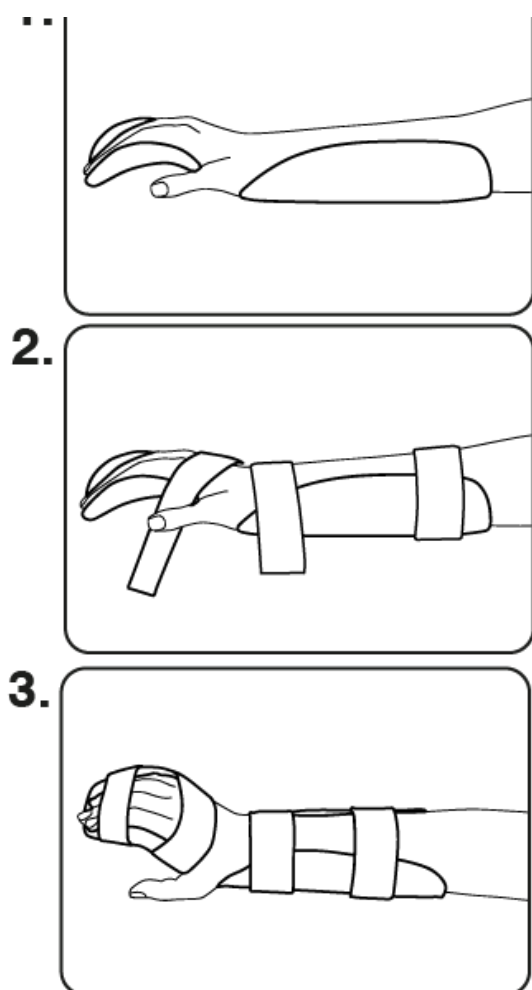

Szczegóły produktu

PREMIUM FORTE (Z WKŁADKĄ)

XXXS (dzieci)

Pomiar

Szerokość dłoni
< 5 cm

Numer REF / zamówienia

711 111 176

XXS (dziecięcy duży)

Pomiar

Szerokość dłoni
5 - 5,5 cm

Numer REF / zamówienia

712 111 176

XS (bardzo mały)

Pomiar

Szerokość dłoni
5,5-6 cm

Numer REF / zamówienia

713 111 176

S (mały)

Pomiar

Szerokość dłoni
6-8 cm

Numer REF / zamówienia

714 111 176

M (średni)

Pomiar

Szerokość dłoni
8-9 cm

Numer REF / zamówienia

716 111 176

L (duży)

Pomiar

Szerokość dłoni
9 < cm

Numer REF / zamówienia

718 111 176