

Orteza przedramienia, dłoni i kciuka/spastyka CH\_73-74

---

## WSKAZANIE

Stabilizacja lub unieruchomienie nadgarstka, dłoni, palców długich i kciuka po urazach (np. skręceniu), zabieg operacyjny i stabilizacja gipsem. Leczenie zachowawcze w zapaleniu ścięgien, stanach zapalnych i chorobach zwyrodnieniowych nadgarstka, dłoni, palców długich i kciuka, nawet w formie szyny odciążającej.

Faza rehabilitacji po operacji ręki. Zalecana dla pacjentów ze spastycznością nadgarstka, długimi palcami i kciukiem.





**ELASTYCZNY**



**ŚWIATŁO**



**PERFOROWANY**



**PRZEZROCZYSTY**




**ZMYWALNY**

## Aplikacja i regulacja

Gotowe do regulacji ortezy Chrisofix® należy dopasować bezpośrednio do uszkodzonej / chorej części ciała. Zgrubną regulację (zginanie) należy wykonać na nieuszkodzonej kończynie o podobnej wielkości. Dokładne regulacje i korekty (np. po zmniejszeniu obrzęku tkanek miękkich) można wykonać bez zdejmowania ortezy.

- Najpierw usuń usztywniacz. Po uformowaniu ortezy (zgodnie z poniższymi krokami) należy również uformować usztywniacz.
- Dopasuj ortezę do dłoni, nadgarstka i przedramienia.
- Ustaw nadgarstek w wymaganej pozycji.
- Włóż ramię stroną dłoniową do wcześniej uformowanej ortezy.
- Dopasuj ortezę poprzez delikatny nacisk na dłoń i przedramię.
- Wymień pręt usztywniający.
- Załóż bandaż na palce, dłoń i przedramię.

Aby zdjąć ortezę, nie trzeba odpinać paska z tyłu dłoni ; dłoń można po prostu wyciągnąć, a następnie ponownie wsunąć w uchwyt. Częste zginanie i rozciąganie ortezy może zaburzyć jej stabilność; należy je ograniczyć do niezbędnego minimum.

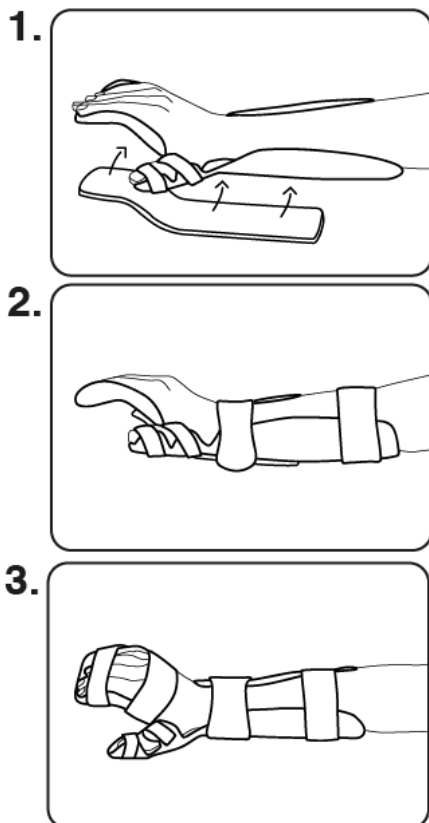

Szczegóły produktu

## **PREMIUM FORTE PLUS (Z WKŁADKĄ)**

### **XS (bardzo mały)**

---

#### **Pomiar**

Szerokość dłoni

< 6 cm

---

#### **Numer REF / zamówienia**

Po prawej: 733 111 159

Lewy: 743 111 159

### **S (mały)**

---

#### **Pomiar**

Szerokość dłoni

< 6-8 cm

---

#### **Numer REF / zamówienia**

Po prawej: 734 111 159

Lewy: 744 111 159

### **M (średni)**

---

#### **Pomiar**

Szerokość dłoni

8-9 cm

---

**Numer REF / zamówienia**

Po prawej: 736 111 159

Lewy: 746 111 159

**L (duży)**

---

**Pomiar**

Szerokość dłoni

9 cm

---

**Numer REF / zamówienia**

Po prawej: 738 111 159

Lewy: 748 111 159

Tworzywo

Pianka polietylenowa (PE), welur poliamidowy (PA), bawełna, aluminium faliste i perforowane (EN AW-1050A)