

# Orteza stopowo-goleniowa CH\_75

---

## **WSKAZANIE**

Krótkotrwałe (na okres odpoczynku) unieruchomienie stopy i/lub stawu skokowego po urazach i/lub zabiegach operacyjnych.






ELASTYCZNY



ŚWIATŁO

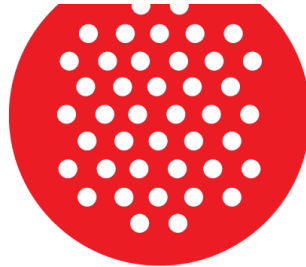

PERFOROWANY



PRZEZROCZYSTY




ZMYWALNY

## Aplikacja i regulacja

Gotowe do regulacji ortezy Chrisofix® należy dopasować bezpośrednio do kontuzjowanej/chorej części ciała. Zgrubną regulację (zginanie) należy wykonać na nieuszkodzonej kończynie o podobnej wielkości. Dokładne regulacje i korekty (np. po zmniejszeniu obrzęku tkanek miękkich) można wykonać bez zdejmowania ortezy.

- Orteza dostarczana jest w formie gotowej do dopasowania, najczęściej stosowanym kątem jest 90°.
- W razie konieczności należy otworzyć części stopowe płytek fiksacyjnych bocznych, ustawić wymagany kąt i ponownie je zamknąć (w przypadku uszkodzeń ścięgna Achillesa należy unieruchomić stopę w pozycji lekko rozciągniętej pod kątem 110°-120°).
- Włóż nogę stroną podeszwową do ortezy.
- Dokładnie dopasuj ortezę do nogi/kostki i zamocuj ją za pomocą bandażi.
- Kolano należy ułożyć w lekkim zgięciu, korzystając z poduszki (przede wszystkim w przypadku kontuzji ścięgna Achillesa).

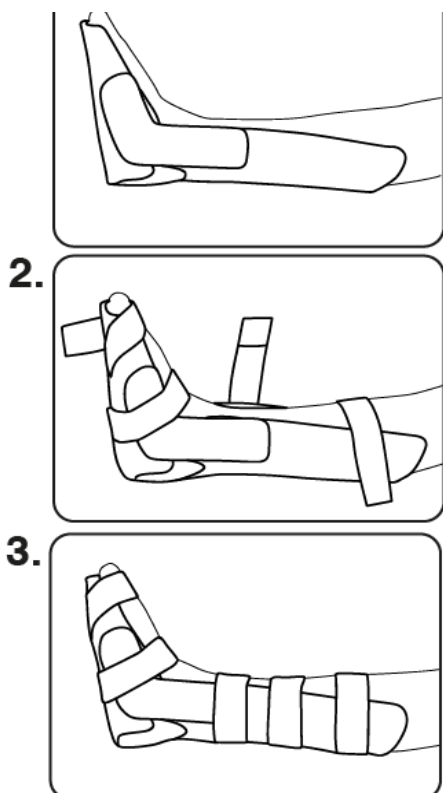

# Szczegóły produktu

## PREMIUM (Z WKŁADKĄ)

### XXXS (dzieci)

---

**Pomiar**

Długość stopy  
< 18 cm

---

**Numer REF / zamówienia**

751 111 194

### XXS (dziecięcy duży)

---

**Pomiar**

Długość stopy  
18 – 20 cm

---

**Numer REF / zamówienia**

752 111 194

### XS (bardzo mały)

---

**Pomiar**

Długość stopy  
20 – 22 cm

---

**Numer REF / zamówienia**

753 111 194

### S (mały)

---

**Pomiar**

Długość stopy  
23 – 24,5 cm

---

**Numer REF / zamówienia**

754 111 194

### M (średni)

---

**Pomiar**

Długość stopy  
25 - 27,5 cm

---

**Numer REF / zamówienia**

756 111 194

**L (duży)**

---

**Pomiar**

Długość stopy  
27,5 < cm

---

**Numer REF / zamówienia**

758 111 194

Tworzywo

Pianka polietylenowa (PE), welur poliamidowy (PA), bawełna, aluminium faliste i perforowane (EN AW-1050A)