

# Uniwersalna orteza spoczynkowa na udo i podudzie – REF\_76

---

## **WSKAZANIE**


Krótkotrwała (na okres odpoczynku) stabilizacja kolana po urazach i zabiegach operacyjnych.



## Aplikacja i regulacja

Gotowe do regulacji ortezy Chrisofix® należy dopasować bezpośrednio do kontuzjowanej/chorej części ciała. Zgrubną regulację (zginanie) należy wykonać na nieuszkodzonej kończynie o podobnej wielkości. Dokładne regulacje i korekty (np. po zmniejszeniu obrzęku tkanek miękkich) można wykonać bez zdejmowania ortezy.

- Orteza dostarczana jest w formie gotowej do dopasowania, pod najczęściej stosowanym kątem.
- W razie potrzeby otwórz boczne płytki mocujące, ustaw wymagany kąt i ponownie je zamknij.
- Włóż nogę stroną podeszwową do ortezy.
- Dokładnie dopasuj ortezę do nogi, kolana i kości udowej.
- Zamocuj ortezę za pomocą bandażu.
- Aby uzyskać najlepsze rozłożenie ciężaru, podeprzyj kolano poduszką w lekko wygiętej pozycji

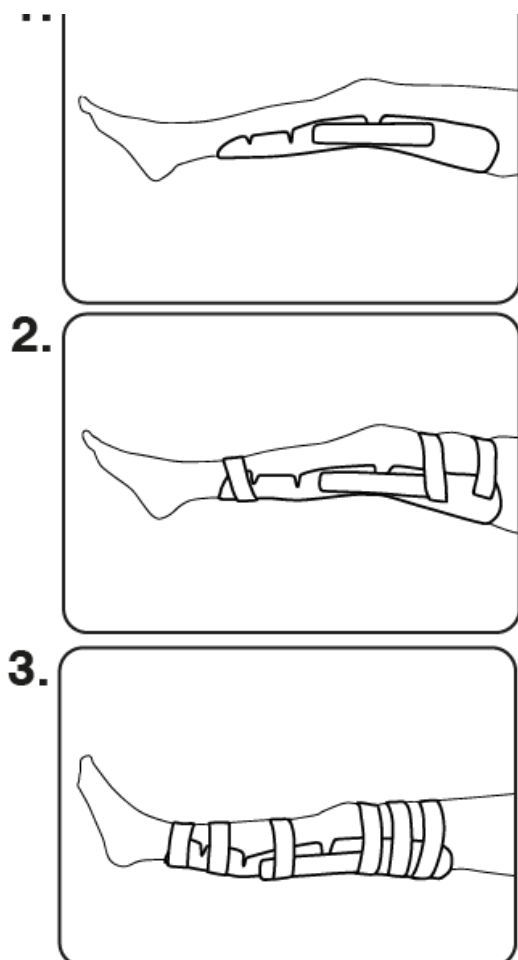



ELASTYCZNY



ŚWIATŁO



PERFOROWANY



PRZEZROCZYSTY



ZMYWALNY

# Szczegóły produktu

## PREMIUM (Z WKŁADKĄ)

### XXXS (dzieci)

---

**Pomiar**

Długość szyny  
36 cm

---

**Numer REF / zamówienia**

761 111 194

### XXS (dziecięcy duży)

---

**Pomiar**

Długość szyny  
43 cm

---

**Numer REF / zamówienia**

762 111 194

### XS (bardzo mały)

---

**Pomiar**

Długość szyny  
50 cm

---

**Numer REF / zamówienia**

763 111 194

### S (mały)

---

**Pomiar**

Długość szyny  
56 cm

---

**Numer REF / zamówienia**

764 111 194

### M (średni)

---

**Pomiar**

Długość szyny  
67 cm

---

**Numer REF / zamówienia**  
766 111 194

**L (duży)**

---

**Pomiar**  
Długość szyny  
76 cm

---

**Numer REF / zamówienia**  
768 111 194