

# Orteza stawu łokciowego z regulacją za kąta zgięcia 90°-110° –CH\_77

---

## WSKAZANIE

Stabilizacja łokcia/przedramienia z jednoczesną blokadą pronacji i supinacji po urazach i zabiegach operacyjnych w obrębie łokcia i/lub przedramienia, a także w ostrych i przewlekłych stanach zapalnych łokcia; nawet w formie szyny nocnej.





ELASTYCZNY



ŚWIATŁO



PERFOROWANY



PRZEZROCZYSTY





ZMYWALNY

## Aplikacja i regulacja

Gotowe do regulacji ortezy Chrisofix® należy dopasować bezpośrednio do uszkodzonej/chorej części ciała. Zgrubną regulację (dopasowanie) należy wykonać na zdrowym palcu. Dokładne regulacje i korekty ( np. po zmniejszeniu obrzęku tkanek miękkich) można wykonać bez zdejmowania ortezy.

- Orteza dostarczana jest w formie gotowej do użycia, najczęściej stosowanym kątem 90°.
- Umieść ramię stroną łokciową w ortezie.
- Dokładnie dopasuj ortezę do ramienia i dłoni.
- Zamocuj ortezę za pomocą bandaży; zablokowanie pronacji i supinacji można zapewnić tylko poprzez zapięcie usztywnionego paska (bandażu stabilizującego dostarczonego wraz z ortezą) pomiędzy kciukiem i palcem wskazującym.

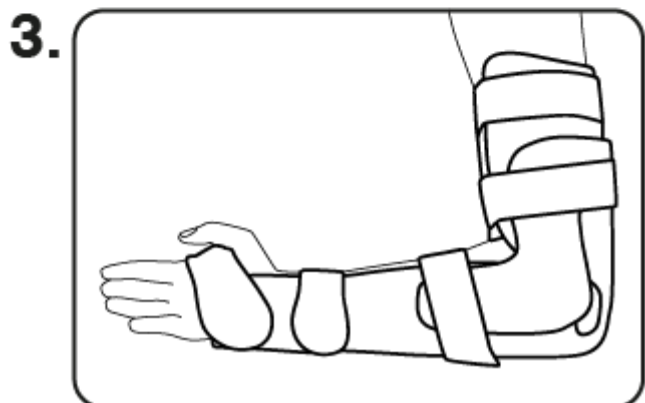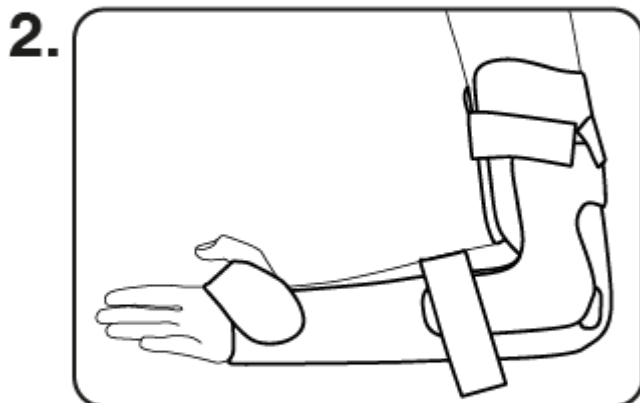

# Szczegóły produktu

## PREMIUM FORTE (Z WKŁADKĄ)

### **XXXS (dziecięcy mały)**

---

#### **Pomiar**

Łokieć – podstawa palca  
20 cm

---

#### **Numer REF / zamówienia**

771 111 177

### **XXS (dziecięcy duży)**

---

#### **Pomiar**

Łokieć – podstawa palca  
20 – 22 cm

---

#### **Numer REF / zamówienia**

772 111 177

### **XS (bardzo mały)**

---

#### **Pomiar**

Łokieć – podstawa palca  
22-26 cm

---

#### **Numer REF / zamówienia**

773 111 177

### **S (mały)**

---

#### **Pomiar**

Łokieć – podstawa palca  
26-30 cm

---

#### **Numer REF / zamówienia**

774 111 177

### **M (średni)**

---

**Pomiar**

Łokieć – podstawa palca  
30-34 cm

---

**Numer REF / zamówienia**

776 111 177

**L(duży)**

---

**Pomiar**

Łokieć – podstawa palca  
34< cm

---

**Numer REF / zamówienia**

778 111 177