

# Orteza na całą kończynę dolną CH\_78

---

## WSKAZANIE

Krótkotrwała (na okres odpoczynku) stabilizacja kolana, kostki i stopy po urazach i zabiegach operacyjnych.






ELASTYCZNY



ŚWIATŁO

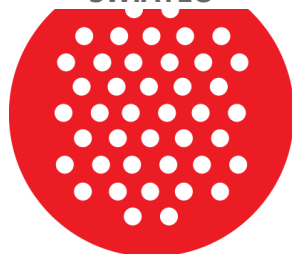

PERFOROWANY



PRZEZROCZYSTY




ZMYWALNY

## Aplikacja i regulacja

Gotowe do regulacji ortezy Chrisofix® należy dopasować bezpośrednio do kontuzjowanej/chorej części ciała. Zgrubną regulację (zginanie) należy wykonać na nieuszkodzonej kończynie o podobnej wielkości. Dokładne regulacje i korekty (np. po zmniejszeniu obrzęku tkanek miękkich) można wykonać bez zdejmowania ortezy.

- Orteza dostarczana jest w formie gotowej do dopasowania, pod najczęściej stosowanym kątem.
- W razie potrzeby otwórz boczne płytki mocujące, ustaw wymagany kąt i ponownie je zamknij.
- Włóż nogę stroną podeszwową do ortezy.
- Dokładnie dopasuj ortezę do nogi, kolana i kości udowej.
- Zamocuj ortezę za pomocą bandażi.
- Aby uzyskać najlepsze rozłożenie ciężaru, podeprzyj kolano poduszką w lekko wygiętej pozycji

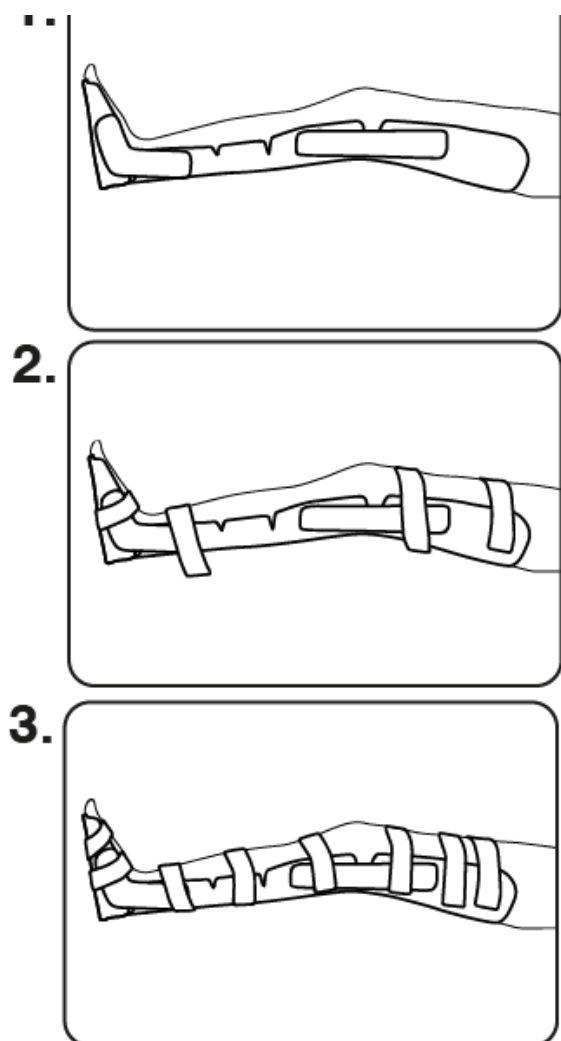

# Szczegóły produktu

## PREMIUM (Z WKŁADKĄ)

### S (mały)

---

**Pomiar**

Długość szyny  
56 cm

---

**Numer REF / zamówienia**

784 111 194

### M (średni)

---

**Pomiar**

Długość szyny  
67 cm

---

**Numer REF / zamówienia**

786 111 194

### L (duży)

---

**Pomiar**

Długość szyny  
76 cm

---

**Numer REF / zamówienia**

788 111 194

Tworzywo

Pianka polietylenowa (PE), welur poliamidowy (PA), bawełna, aluminium faliste i perforowane (EN AW-1050A)