

Orteza na palec (DIP+PIP) – plastyczna –
CH_10

WSKAZANIE

Zalecany do stabilizacji stawów PIP i DIP po urazach, przeciążeniach i przeciężeniach, uszkodzeniach więzadeł i niektórych złamaniach lub w przypadku stanów zwyrodnieniowych/zapalenia stawów (a także reumatoidalnego zapalenia stawów, dny moczanowej, chorób autoimmunologicznych) lub jako element rehabilitacji pooperacyjnej w niektórych przypadkach.

Giętka orteza Chrisofix® na długi palec stabilizuje palec w odpowiedniej i pożądanej pozycji – jeśli różni się ona od opisanej powyżej pozycji anatomicznej (0° lub wyprostowanej), a dzięki swojej innowacyjnej konstrukcji gwarantuje również stabilność, komfort i precyzyjne dopasowanie.




[123456](#)



ELASTYCZNY



ŚWIATŁO

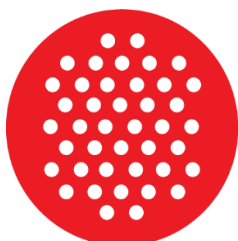

PERFOROWANY



PRZEZROCYSTY




ZMYWALNY

Aplikacja i regulacja

Gotowe do regulacji szyny/ortezy Chrisofix® należy dopasować bezpośrednio do uszkodzonej/chorej części ciała. Wstępną regulację (doginanie) należy wykonać na zdrowym

palcu. Dokładne regulacje i korekty (np. po zmniejszeniu obrzęku tkanek miękkich) można wykonać bez zdejmowania szyny/ortezy.

Palec, który ma zostać unieruchomiony, musi zostać umieszczony w ortezie/szynie. Ortezę należy starannie dopasować do palca, delikatnie ją dociskając. Szyny/ortezy można zamocować za pomocą dołączonych rzepów. Częste zginanie i rozciąganie ortezy/szyny może osłabić jej stabilność; należy ograniczyć je do niezbędnego minimum.

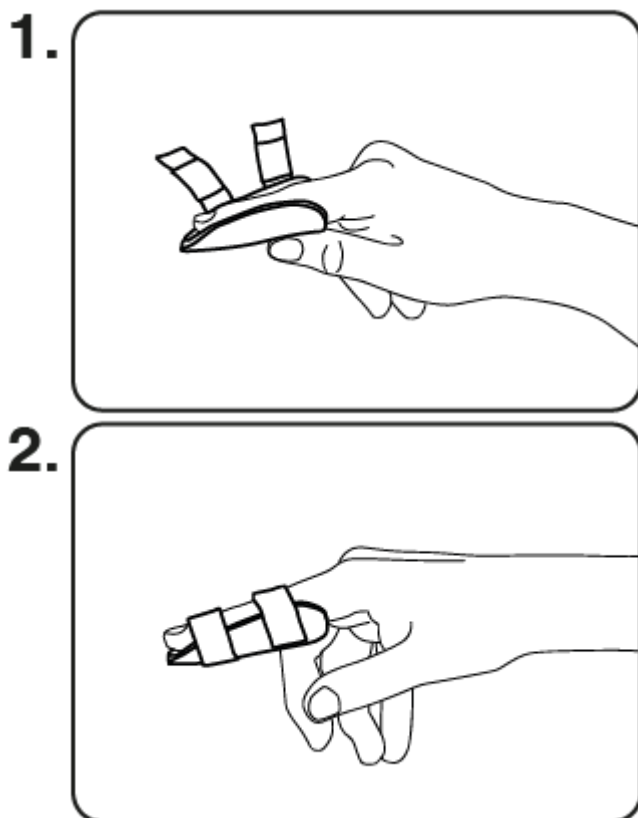

Tworzywo

Pianka polietylenowa (PE), welur poliamidowy (PA), bawełna, aluminium faliste i perforowane (EN AW-1050A)

Szczegóły produktu

PREMIA

XXXS (dzieci)

Pomiar

Długość szyny
4,3 cm

Numer REF / zamówienia

101 121 104

Opakowanie 10 szt.: 101 121 304

Opakowanie 100 szt.: 101 121 904

XXS (dziecięcy duży)

Pomiar

Długość szyny
5,5 cm

Numer REF / zamówienia

102 121 104

Opakowanie 10 szt.: 102 121 304

Opakowanie 100 szt.: 102 121 904

S (mały)

Pomiar

Długość szyny
6,5 cm

Numer ref./zamówienia

104 121 104

Opakowanie 10 szt.: 104 121 304

Opakowanie 100 szt.: 104 121 904

L (duży)

Pomiar

Długość szyny
7,2 cm

Numer REF / zamówienia

108 121 104

Opakowanie 10 szt.: 108 121 304

Opakowanie 100 szt.: 108 121 904

XL (bardzo duży)

Pomiar

Długość szyny

9,7 cm

Numer ref./zamówienia

109 121 104

Opakowanie 10 szt.: 109 121 304

Opakowanie 100 szt.: 109 121 904