


Orteza stopowo -goleniowa z otwartą piętą CH_82

WSKAZANIE

Krótkotrwałe (na okres odpoczynku) unieruchomienie stopy i/lub stawu skokowego po urazach i/lub zabiegach operacyjnych.



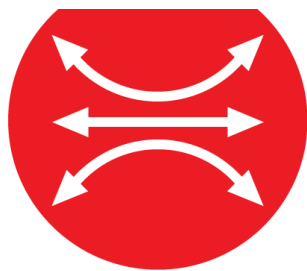

ELASTYCZNY



ŚWIATŁO



PERFOROWANY



PRZEZROCZYSTY




ZMYWALNY

Aplikacja i regulacja

Gotowe do regulacji ortezy Chrisofix® należy dopasować bezpośrednio do kontuzjowanej/chorej części ciała. Zgrubną regulację (zginanie) należy wykonać na nieuszkodzonej kończynie o podobnej wielkości. Dokładne regulacje i korekty (np. po zmniejszeniu obrzęku tkanek miękkich) można wykonać bez zdejmowania ortezy.

- Orteza dostarczana jest w formie gotowej do dopasowania, najczęściej stosowanym kątem jest 90°.
- W razie konieczności należy otworzyć części stopowe płytek fiksacyjnych bocznych, ustawić wymagany kąt i ponownie je zamknąć (w przypadku uszkodzeń ścięgna Achillesa należy unieruchomić stopę w pozycji lekko rozciągniętej pod kątem 110°-120°).
- Włóż nogę stroną podeszwową do ortezy.
- Dokładnie dopasuj ortezę do nogi/kostki i zamocuj ją za pomocą bandażi.
- Kolano należy ułożyć w lekkim zgięciu, korzystając z poduszki (przede wszystkim w przypadku kontuzji ścięgna Achillesa).

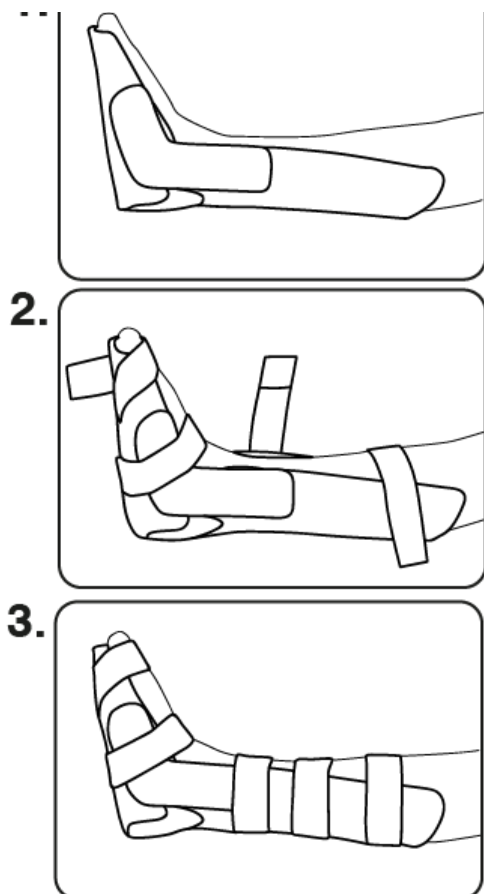

Szczegóły produktu

PREMIUM (Z WKŁADKĄ)

XXXS (dzieci)

Pomiar

Długość stopy
< 18 cm

Numer REF / zamówienia

821 111 193

XXS (dziecięcy duży)

Pomiar

Długość stopy
18 – 20 cm

Numer REF / zamówienia

822 111 193

XS (bardzo mały)

Pomiar

Długość stopy
20 – 22 cm

Numer REF / zamówienia

823 111 193

S (mały)

Pomiar

Długość stopy
23 – 24,5 cm

Numer REF / zamówienia

824 111 193

M (średni)

Pomiar

Długość stopy
25 - 27,5 cm

Numer REF / zamówienia

826 111 193

L (duży)

Pomiar

Długość stopy
27,5 < cm

Numer REF / zamówienia

828 111 193

Tworzywo

Pianka polietylenowa (PE), welur poliamidowy (PA), bawełna, aluminium faliste i perforowane (EN AW-1050A)