


Orteza na dłoń i przedramię – zespół cieśni nadgarstka – wersja aktywna CH_53


WSKAZANIE

Do stosowania w ciągu dnia ☀️

Dzienna wersja ortezy **nadgarstka Chrisofix®** ma na celu unieruchomienie nadgarstka w odpowiedniej pozycji, co pozwala łagodzić objawy zespołu cieśni nadgarstka w ciągu dnia. Zaleca się również noszenie go w przypadku zapalenia pochewki ścięgna, zapalenia stawów lub innych stanów zwyrodnieniowych nadgarstka, bólu nadgarstka lub urazu (np. skręcenia, zwichnięcia więzadeł itp.), a także po operacji nadgarstka lub zdjęciu unieruchomienia gipsowego.

Ortezy dzienne zapewniają wysoki stopień stabilności i dobrego unieruchomienia, zachowując jednocześnie dużą swobodę ruchu ręki, co pozwala na wykonywanie wielu różnych zadań.

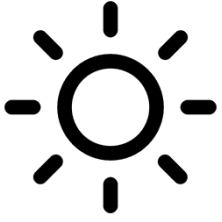

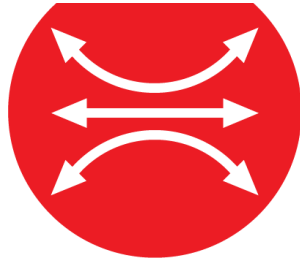

ELASTYCZNY



ŚWIATŁO



PERFOROWANY



PRZEZROCZYSTY




ZMYWALNY

Aplikacja i regulacja

Gotowe do regulacji ortezy Chrisofix® należy dopasować bezpośrednio do kontuzjowanej/chorej części ciała. Zgrubną regulację (zginanie) należy wykonać na nieuszkodzonej kończynie o podobnej wielkości. Dokładne regulacje, czyli korekty (np. po zmniejszeniu obrzęku tkanek miękkich), można wykonać bez zdejmowania ortezy.

- Umieść przedramię stroną promieniową w gotowej do użycia ortezie.
- Ortezę należy dopasować do dłoni i nadgarstka utrzymywanych w pozycji fizjologicznej.
- Zamocuj ortezę za pomocą bandażu.

Aby zdjąć ortezę, nie trzeba odpinać paska z tyłu dłoni; dłoń można po prostu wyciągnąć, a następnie ponownie wsunąć w uchwyt. Częste zginanie i rozciąganie ortezy może zaburzyć jej stabilność; należy je ograniczyć do niezbędnego minimum.

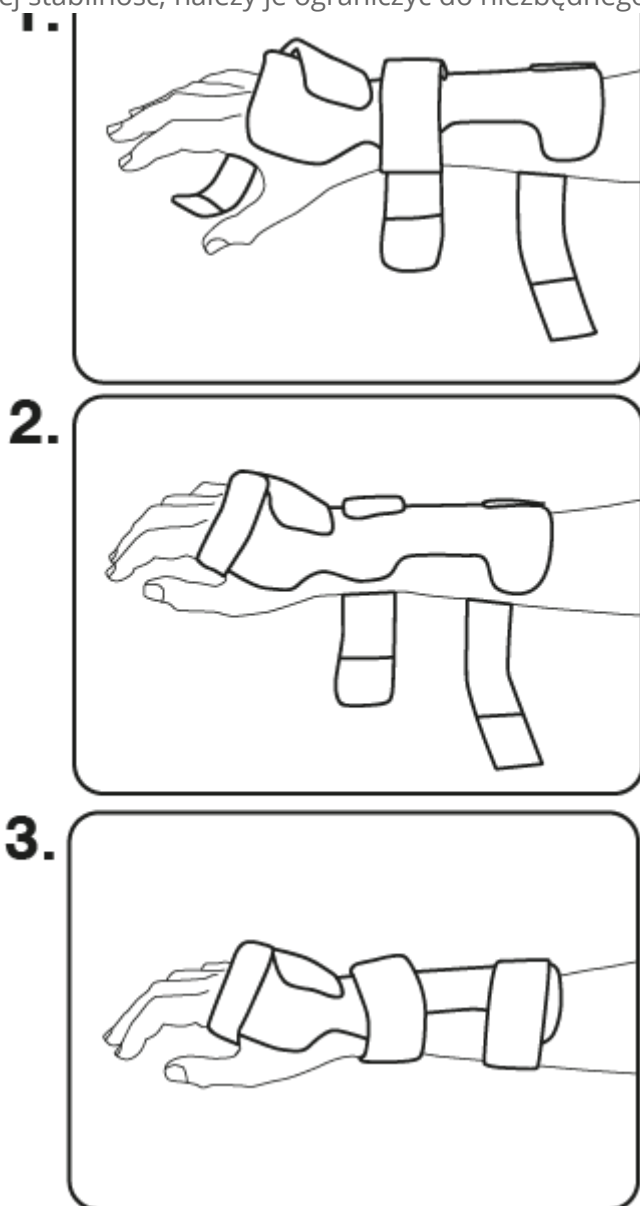

Szczegóły produktu

PREMIUM FORTE

S (mały)

Pomiar

Szerokość dłoni
< 8 cm

Numer REF / zamówienia

534 111 181

M (średni)

Pomiar

Szerokość dłoni
8 <

Numer REF / zamówienia

536 111 181